


# A4 クリアホルダー フェイスシールド 作り方


## 【用意するもの】

- ・型紙
- ・A4クリアホルダー（透明度の高いもの）
- ・はさみ

↓閉じている方

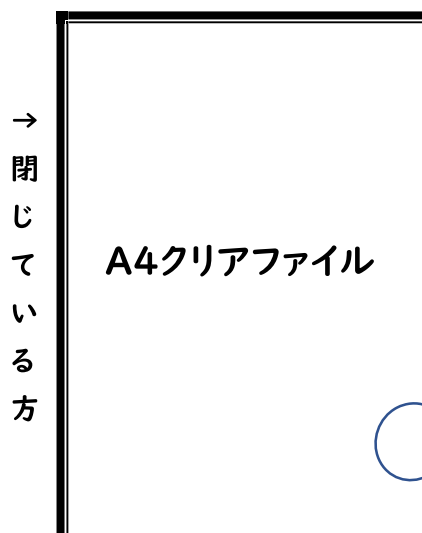

← ← ← ← ←  
型紙をクリアファイルの中に入れる

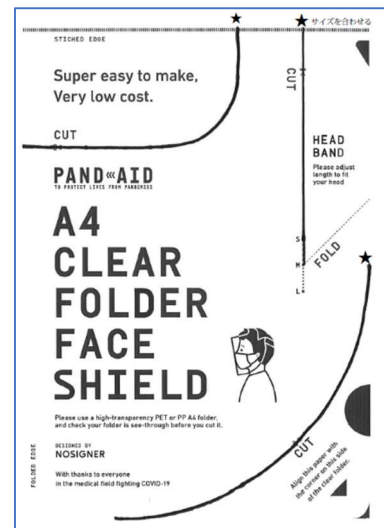

## 【手順】

- ① 型紙をクリアファイルに入れる  
(クリアファイルの閉じている部分を左上にする)
- ② 型紙の切り取り線に沿って切る (★CUT3 か所)

引用元:

「A4 クリアファイルで作るフェイスシールド」型紙と作り方が無料公開 線に沿って切るだけ、数十秒でマスクの代用品が完成

[https://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/2004/21/news122.html#l\\_kutsu\\_200421faceshield06.jpg](https://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/2004/21/news122.html#l_kutsu_200421faceshield06.jpg)

サイズを合わせる

STICHED EDGE

Super easy to make,  
Very low cost.

CUT

**PAND«AID**  
TO PROTECT LIVES FROM PANDEMICS

# A4 CLEAR FOLDER FACE SHIELD



Please use a high-transparency PET or PP A4 folder,  
and check your folder is see-through before you cut it.

DESIGNED BY  
**NOSIGNER**

With thanks to everyone  
in the medical field fighting COVID-19

CUT

**HEAD  
BAND**

Please adjust  
length to fit  
your head

S

M

L

FOLD

CUT

Align this paper with  
the corner on this side  
of the clear folder.

FOLDED EDGE